


# Algides Ultra

**Abdruckdesinfektion  
- gebrauchsfertig -**

CE  
0124

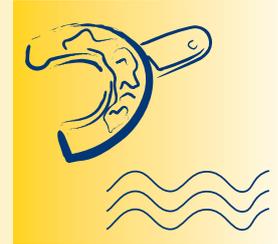

## Präparatetyp

Gebrauchsfertige Lösung zur Tauchdesinfektion und Reinigung von Abformungen.

**Algides Ultra** beeinflusst die Oberflächenqualität und das Dimensionsverhalten der Materialien nicht und verhält sich farb- und geruchsneutral.

**Algides Ultra** ist geeignet für zahntechnische Werkstücke und Prothetikmaterial aus Polyether, A/C-Silikonen, Alginaten und Hydrokolloiden. Das Produkt ist frei von Formaldehyd und Phenolen.

## Anwendung

Alginat- und Hydrokolloide kurz in die Lösung eintauchen und anschließend 10 min. abtrocknen lassen. Alle anderen Materialien werden 10 min. in die Lösung eingelegt.

## Wirkungsspektrum

bakterizid  
fungizid  
virusinaktivierend (HBV/HIV/HCV, Rota)

## Konzentrationen u. Einwirkzeiten

Einwirkzeiten nach DGHM/VAH:  
konzentriert 10 min. inkl. HBV/HIV/HCV,  
Rota-Viren

## Zusammensetzung

In 100 g Lösung sind enthalten:

0,01 g Pentandial

0,20 g Ethandial

0,48 g Benzalkon A

Die im Produkt enthaltenen Tenside sind biologisch abbaubar gem. Detergenzienverordnung.

## Lieferformen

Einzelabpackung

5-l-Kanister

## Besondere Hinweise

Gemäß UVV sind beim Umgang mit nicht für die Haut bestimmten Desinfektionsmitteln Schutzhandschuhe zu tragen.

Haut- und Augenkontakt mit der Gebrauchslösung vermeiden. Benetzte Hautpartien sofort mit viel Wasser abspülen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Nicht einnehmen!

## Zulassung:

- Registriert als Medizinprodukt gem.  
EU-Richtlinie 93/42 EWG

Stand: 03/07



**müller-  
omicron**  
D E N T A L

Müller-Omicron GmbH & Co. KG  
Schlosserstraße 1, DE-51789 Lindlar  
Tel. +49 22 66 4742-0